


Afnemen en voorbereiden van hematologiemonsters

1. Gebruik het juiste EDTA-buisje.

Gebruik één van de volgende:

- Standaard EDTA-buis (zoals IDEXX VetCollect*-buisjes¹)
- Microtainer (alleen geschikt voor de ProCyte Dx* Hematologie Analyzer en ProCyte One* Hematologie Analyzer)

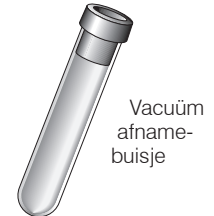


Vul de bus volgens de specificaties van de fabrikant.

¹IDEXX VetCollect-buisjes zijn vereist voor de LaserCyte* Hematologie Analyzer en LaserCyte* Dx Hematologie Analyzer.

2. Gebruik het juiste materiaal voor het afnemen van monsters.

Gebruik een injectiespuit of vacuüm afnamesysteem.


Gebruik het juiste formaat naald voor de patiënt.

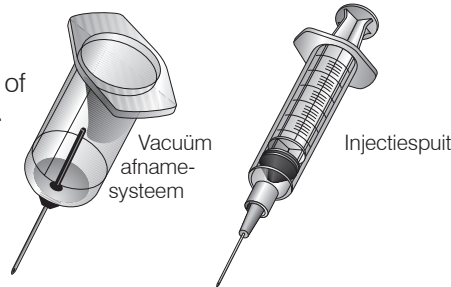

3. Neem het monster af.

- Als u een injectiespuit gebruikt, breng het monster dan onmiddellijk over in de EDTA-buis.
- Als u een vacuümbuis gebruikt, duw dan de naald van de injectiespuit door de rubberen stop van de vacuümbuis. Het vacuüm zal het juiste monstervolume afnemen. Als het monster aanvankelijk niet in de bus stroomt, druk dan **lichtjes** op de zuiger van de spuit om het monster te laten stromen.

BELANGRIJK: Vul de bus volgens de specificaties van de fabrikant.

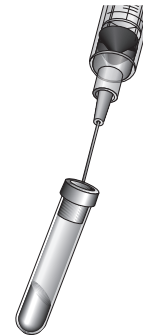

4. Meng het monster.

Zwenk het monster handmatig (en voorzichtig) 10 keer.



Opmerking voor monsters die worden uitgevoerd met de LaserCyte-Analyzer of LaserCyte Dx-Analyzer: Als de dop van de EDTA-buis (om welke reden dan ook) is verwijderd, moet de bus worden ontvlucht door een naald door de stop te steken om de luchtdruk in evenwicht te brengen, voordat de bus in de analyzer wordt geplaatst.

