


# IDEXX VetLab\* UA\*-analyzer

## Korte handleiding

### IDEXX UA\*-strips uitlezen


Gebruik verse urine die nog niet is gecentrifugeerd. Meng het urinemonster goed. Voor het uitvoeren van de test moet het monster op kamertemperatuur zijn en niet langer dan een uur hebben stilgestaan.

Voor verdere instructies, zie de *IDEXX VetLab\* UA\* Gebruikershandleiding*.

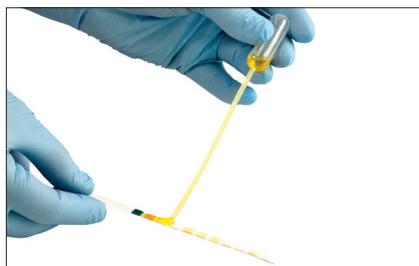


- 1 Doordrenk de UA-strip met het urinemonster met behulp van een pipet en zorg er daarbij voor dat alle testblokjes vochtig worden. Buig de strip niet.


**BELANGRIJK:** Er mogen alleen IDEXX UA-strips worden gebruikt in de IDEXX VetLab UA-analyzer. Gebruik geen ander merk strips.

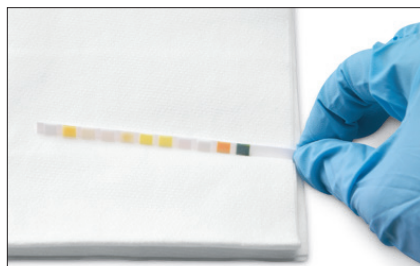

- 2 Dep de teststrip eerst met de lange zijde (ongeveer één seconde) en dan met de achterkant kortstondig op een absorberend oppervlak (bijv. een papieren tissue).

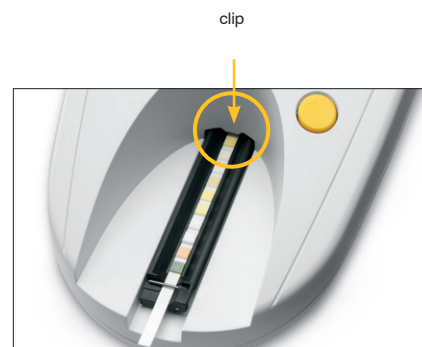

- 3 Leg de teststrip met de testblokjes naar boven in de teststriplade, zodanig dat het voorste deel van de strip wordt vastgeclipd in de clip bij de plaatsingsleuf. Het grendelstaafje moet zijn uitgeklast. Ongeveer 2 mm van de strip moet onder de clip zijn vastgeclipd.

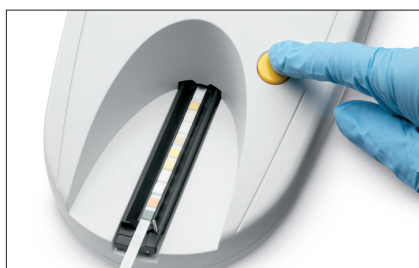

- 4 Druk op de **Start**-knop. Er klinkt een pieptoon. De lade komt iets naar buiten en het grendelstaafje klapt in.

De teststrip wordt automatisch met de teststriplade in de analyzer geschoven zodat deze kan worden uitgelezen, waarna deze terugkeert naar de startpositie. U mag de teststrip pas verwijderen als de analyzer weer in de modus ready-to-measure (klaar om te meten) staat. Vanaf het moment dat u op de Start-knop drukt duurt het ongeveer 80 seconden totdat alle metingen zijn voltooid.



- 5 Verwijder, nadat de resultaten zijn afgedrukt, de teststrip en gooi deze weg. Veeg eventuele op de lade achtergebleven urine weg met een pluisvrije doek.

**OPMERKING:** Als de UA-analyzer is verbonden met het IDEXX VetLab Station worden de testresultaten automatisch verzonden.

### Technische ondersteuning IDEXX

Netherlands 0707007033

Belgium 027006438