

# De SNAP Pro\* Analyzer reinigen

## De interne onderdelen reinigen (wekelijks of indien nodig)



1. Schakel de analyzer uit en ontkoppel de voedings- en/of ethernetkabels.




2. Gebruik een platte schroevendraaier of munt om de twee zilverkleurige bevestigingen aan de onderzijde van de uitgeschakelde analyzer een kwartslag linksom te draaien.



3. Haal de analyzer van het voetstuk af.



4. Reinig het **gehele** voetstuk met een pluisvrij doekje of een wattenstaafje dat is bevochtigd met 70% isopropylalcohol, milde vloeibare zeep en water, of een 10%-bleekmiddeloplossing.

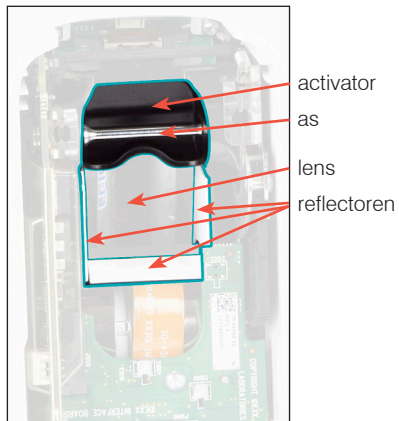

5. Reinig de 3 witte reflectoren, de as en de activator met een nieuw pluisvrij doekje of een wattenstaafje dat is bevochtigd met 70% isopropylalcohol, milde vloeibare zeep en water, of een 10%-bleekoplossing. **Reinig NOOIT de lens.**



6. Is het voetstuk droog, bevestig het dan weer op de analyzer en zorg ervoor dat het vast vergrendeld zit.



7. Draai de zilverkleurige bevestigingen een kwartslag om het voetstuk te vergrendelen.



8. Zorg ervoor dat het voetstuk en de zilverkleurige bevestigingen gelijk liggen met de analyzer en op hun plaats zijn vergrendeld. **Wanneer het voetstuk en de bevestigingen niet naar behoren zijn vergrendeld, kan dat de werking van de analyzer beïnvloeden.**

## De behuizing en het scherm reinigen (indien nodig)



Maak de behuizing en het scherm schoon met een pluisvrij doekje dat is bevochtigd met 70% isopropylalcohol, milde vloeibare zeep en water, of een 10%-bleekmiddeloplossing.

**Veeg NIET** over de ventilatieopeningen onder de aan/uit-knop of de USB-/voedings-/ethernetpoort.

Stel de analyzer tijdens het reinigen niet bloot aan:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <del>X</del> Organische oplosmiddelen            | <del>X</del> Insecticiden     |
| <del>X</del> Reinigingsmiddelen op ammoniakbasis | <del>X</del> Desinfectantia   |
| <del>X</del> Inktmarkers                         | <del>X</del> Polijstmiddelen  |
| <del>X</del> Sprays met vluchtige vloeistoffen   | <del>X</del> Luchtverfrissers |